

Optra 辅助工具系列

创新性产品



OptraDam® Plus | OptraGate® ExtroSoftVersion | OptraSculpt® | OptraSculpt® Pad | OptraStick®

三维立体橡皮障

三维立体开口器

树脂塑型工具

泡沫树脂塑型工具

球形修复体黏接棒


ivoclar
vivadent
passion vision innovation
义获嘉伟瓦登特公司

OptraDam® Plus 三维立体橡皮障

独创的术区隔离橡皮障

创造一个稳定可控的治疗环境

OptraDam® Plus 的三维立体个性化结构可充分暴露术区牙体或龋洞的解剖形态，让医生获得良好的口腔视野，更容易进入工作区域。

一步式解决方法

多亏了OptraDam® Plus独特的设计结构，富有弹性的内外两圈塑料环，使医生拿持或放入患者口中更加容易。

快捷隔离牙体技术

由于OptraDam® Plus 的三维立体设计结构，患者戴入口内后感觉比较舒服，环的结构正好卡在前庭沟的四周，提高了牙体的封闭程度。乳胶材料的高度弹性设计避免了隔离牙齿时橡皮障撕破的危险。

佩戴十分舒适

OptraDam® Plus 独有的设计为患者佩戴带来极大的舒适度。既提供了完美的隔离效果，又保护了口内软组织结构。



颊图解：

后牙用橡皮障隔离前最好先在邻牙间放入木楔，这样橡皮障更容易放入邻牙接触点间。

(图片来源：Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)

OptraGate® ExtraSoft Version 三维立体开口器

无乳胶成分，充分撑开嘴唇和脸颊，长期佩戴口角无酸痛

弹性更好

OptraGate® ExtraSoft Version 可以均匀地将脸和嘴唇避开，使前后牙的工作术区一目了然。

工作更加快捷

有了OptraGate 开口器，省去了很多开口工具。开口器的佩戴只需医生独立操作，不需要助手的任何帮助比如牵拉口角和脸颊，从而腾出精力准备别的工作。

佩戴非常舒适

无乳胶成分的OptraGate 开口器柔软又富有弹性，佩戴非常舒适，尤其针对儿童的佩戴。相比硬塑料的开口器，OptraGate 甚至还允许患者在治疗期间闭上牙齿。

广泛的适应症

- 进行专业洁牙
- 修复治疗
- 牙齿漂白
- 进行口内直接和间接修复
- 口内检查
- 正畸治疗
- 儿科治疗
- 其他



OptraSculpt® 树脂塑型工具

不粘树脂，树脂塑型更佳自如

操作简单

包括两个高温高压灭菌操作手柄，以及六种不同形状的一次性塑型头。









不粘树脂

创新的塑型头不粘树脂，临床医生可以快速准确的塑形。

高灵活性，适合所有适应症

不同形状的塑型头可以单独组合创建最适合于手头临床情况的操作工具，使临床医生灵活准确的塑造修复体。塑型头可以360度旋转调整，使您的操作更加随心所欲。

圆柱形	凿形	抹刀形	球形	圆锥形	棱锥形
					
I和II类洞的充填	边缘脊，V类洞颈缘的塑形	V类洞填，唇舌侧光滑面塑形	树脂材料植入窝洞，前牙边缘嵴塑形	颌面点隙窝沟塑形	颌面点隙窝沟和边缘嵴的塑形



Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Optra

OptraSculpt[®] Pad 泡沫树脂塑型工具

无粘质感材料表面，高效塑造修复体轮廓

不粘树脂—轻松塑形

OptraSculpt Pad 不粘树脂，可以轻松的塑造树脂充填材料的形状和轮廓。可高效的制作表面光滑、均匀的修复体。

塑造光滑均匀的修复体表面

由于泡沫垫的特殊材料，可以做出前牙和颈缘区的自然效果。合成泡沫垫的灵活设计使充填材料表面具有光滑的轮廓。

专业的美学效果

仪器上的参考尺度可协助制作美学正确的前牙解剖形态的修复体。这些标记可以成为临床操作结果与理想的平均牙齿宽度比例、上颌前牙轴向倾角的对比参考。



使用 OptraSculpt Pad 塑型




使用 OptraSculpt Pad 塑型后的效果



参考尺度 1



参考尺度 2

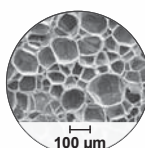

泡沫的显微图像

OptraStick[®] 球形修复体黏接棒

方便的粘性操作工具

OptraStick 可以很容易迅速的粘起，拿住和放置一些细小的修复体。

例如：

IPS Empress 和IPS e.max 制作嵌体，高嵌体，全冠和贴面。

IPS d.SIGN 和IPS InLine 制作贴面，或Academy Gold™ 和 Harmony Medium 制作嵌体、高嵌体、 $\frac{3}{4}$ 冠。



Optra 包装信息

OptraDam® Plus

套装

25个 Size R 标准号
25个 Size S 小号

补充装

50个 Size R 标准号
50个 Size S 小号



OptraGate® ExtraSoft Version

套装

40个 Size R 标准号
40个 Size S 小号

补充装

80个 Size R 标准号
80个 Size S 小号
80个儿童号



OptraSculpt® Pad

套装

1个OptraSculpt Pad 手柄
1个OptraSculpt Pad 补充装/4 mm/60
1个OptraSculpt Pad 补充装/6 mm/60



OptraSculpt Pad 补充装/4 mm/60个

OptraSculpt Pad 补充装/6 mm/60个

OptraSculpt Pad 手柄补充装

OptraSculpt®

套装

1个塑型手柄 (单端安装塑型头)
1个塑型手柄 (双端安装塑型头)
40个球形塑型头
40个圆锥形塑型头
40个抹刀形塑型头
40个凿形塑型头
40个圆柱形塑型头
40个棱锥形塑型头



塑型手柄补充装

1个塑型手柄 (单端安装塑型头)

塑型手柄补充装

1个塑型手柄 (双端安装塑型头)

塑型头补充装

每种形态塑型头提供100个一盒的补充装

OptraStick®

补充装

50个一盒



Optra

官方微信



义获嘉伟瓦登特(上海)商贸有限公司
地址: 上海市静安区武定路881号1号楼2楼
电话: +86 21 6032 1657
传真: +86 21 6176 0968
邮件: info.cn@ivoclarvivadent.com
网址: www.ivoclarvivadent.cn

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation
义获嘉伟瓦登特公司