

UTS 3D 面弓转移系统

一、临床操作步骤：



标记Camper

平面（耳屏上缘到鼻翼下缘的平面）参考点。



标记Frankfort

平面（耳屏上缘到眶下缘的平面）参考点。




5a

将面弓上的指示杆调到Camper平面的参考点上。



6

调节鼻托的高度。

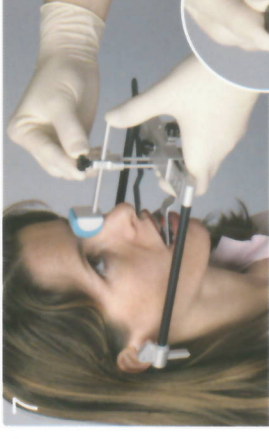

7

拧紧螺丝，确保鼻垫不会移动。



2

咬合记录——用颌叉取上颌咬合记录。




3

放置面弓。



4

调整面弓的宽度。

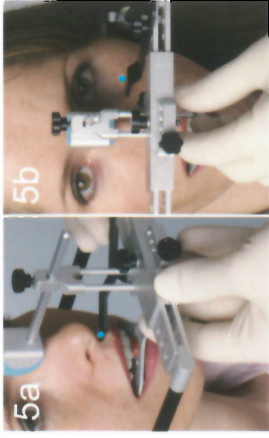

5b

将面弓上的指示杆调到Frankfort平面的参考点上。



8

将3D万向关节和面弓相连接。



9

将3D万向关节和颌叉相连接。



10

将螺丝拧紧，固定3D万向关节。



11

取下下面弓。



12

取下3D万向关节。

注意：应保持3D万向关节的螺丝杆位于万向关节的右边。

UTS 3D 面弓转移系统

二、技工室操作步骤：

方法 1



1a

如果面弓以Camper平面为参考平面，则选用Camper平面的万向关节转移台。



1b

如果面弓以Frankfort平面为参考平面，则选用Frankfort平面的万向关节转移台。

方法 2

将面弓直接与Stratos颌架相连。



3D 万向关节的结构：



a UTS 颌叉和中心托盘的连接方式。

b UTS 3D 颌叉的连接方式。

颌叉与3D万向关节的连接方式。



2 移除切导针并固定平面指针。

4 将带有颌叉的3D万向关节安装于3D万向关节转移台上。

5 将带有3D万向关节的转移台连接到Stratos颌架上。

3 移除固定盘，安装带有颌叉支持架的固定装置。

义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司
地址：上海市静安区武定路881号1号楼2楼
电话：+86 21 6032 1657
传真：+86 21 6176 0968
邮件：info.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.cn

义获嘉伟瓦登特公司北京分部
威兰德中国销售及技术服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院
1号楼1楼南区（878东区）
电话：+86 10 5735 1688
传真：+86 10 5735 1699
邮件：wieland-service.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.com

官方微信



官方微博



ivoclar
vivadent
passion vision innovation
义获嘉伟瓦登特公司