

Tetric N®-Bond Universal

全能通用型粘接剂

直接修复



通用

牙本质饰色技术首选
可应用于直接及间接修复粘接，适用于所有粘接技术
(全酸蚀技术、自酸蚀技术、选择性酸蚀技术)



义获嘉伟瓦登特公司直接修复产品线由Tetric N、Optra及Bluephase三大品牌构成，基本囊括了整个直接修复过程——从隔离到预防。产品完美结合，保证椅旁效率及修复效果。



相关产品

OptraSculpt® pad

全新泡沫充填系统



全新充填体验

- 泡沫材质充填头，操控更轻松，不粘材料
- 4型充填头，依据牙体解剖外形设计，塑型更轻松
- 可更换充填头，拒绝交叉感染
- 手柄可反复消毒，提升经济性

Bluephase N Family®

全能光固化灯家族



全能型LED光固化灯家族产品

- Bluephase N—第三代LED固化灯，宽光谱，更全能
- Bluephase NM—无线LED灯，使用更方便
- Bluephase NMC—超高性价比，经济更实惠

义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司
地址：上海市静安区武定路881号1号楼2楼
电话：+86 21 6032 1657
传真：+86 21 6167 0948
邮件：info.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.cn

义获嘉伟瓦登特公司北京分部
威兰德中国销售及技术服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院
1号楼1楼南区（878东区）
电话：+86 10 5735 1688
传真：+86 10 5735 1699
邮件：wieland-service.cn@ivoclarvivadent.com
网址：www.ivoclarvivadent.cn

资料仅供内部培训使用

Tetric® N Collection

直接修复解决方案



瓷化纳米树脂 牙本质饰色解决方案

从左至右：
Tetric® N-Ceram | Tetric® N-Ceram Bulk Fill | Tetric® N-Flow
N-Etch | Tetric® N-Bond Universal

ivoclar
vivadent
passion vision innovation
义获嘉伟瓦登特

ivoclar
vivadent
passion vision innovation
义获嘉伟瓦登特

Tetric N®-Ceram

瓷化纳米树脂

- 纳米混合填料树脂
- 天然的色彩搭配
- 简单的颜色系统
- 牙本质饰色技术绝佳搭配
- 绝佳的X线阻射效果

有16种颜色选择：10种通用色，2种牙本质色，1种透明色，3种特殊效果色
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M;



前牙简单美学——牙本质饰色

适应症：I—V等各种洞形，满足临床80%的美学需求；



比色
牙釉质色:牙体中1/3或修复区域附近比
牙本质色:修复区域饱和度决定
饱和度(如A3)—A3.5Dentin
饱和度低(如A2)—B2Dentin



牙本质树脂充填
厚度不小于
去除牙本质的厚度



牙釉质树脂充填
厚度不大于
去除牙釉质的厚度



牙釉质树脂抛光完成
1.邻面使用抛光砂条抛光
2.其他区域建议使用
OptraPol一步式抛光系统处理



Dr. E. Mahn, Chile, 2011



* 推荐搭配使用：OptraPol® 一步式抛光

Tetric N®-Ceram Bulk Fill

3次方大块充填树脂



3次方大块充填树脂加入了3种科技成分：

- 1.缓解收缩应力成分
- 2.新型光引发剂Ivocerin
- 3.光敏抑制成分

这3种科技成分使它克服了众多大块充填的难题，达成以下特性：

- 收缩应力低，避免术后发生继发龋的可能
- 毋需过份增加树脂透明度，使修复体颜色不易发灰
- 对环境光不敏感，临床医生有超过3分钟时间塑形



高效

后牙简单充填——大块树脂技术

适应症：各类洞型；



大块充填
4mm以内一次性充填，
4-8mm两层即可完成



光固化
1000mW/cm2
光照10s



抛光完成
1.邻面使用抛光砂条抛光
2.其他区域建议使用OptraPol
一步式抛光系统处理



Tetric N® Flow

瓷化纳米流体树脂

Tetric N-flow瓷化纳米流体树脂中的粘度控制技术使其具备优异的流动度，因此非常适合用于充当垫底材料。同时，由于其良好的稳定性、充填不塌陷，还可用于V类洞（楔状缺损）修复。

- Tetric N-Ceram 最佳搭档
- 良好的触变性、能方便的应用于所有的区域
- 良好的稳定性，V类洞充填的最佳选择
- 较高的X线阻射为医生诊断提供了方便

有10种颜色选择：6种通用色，1种牙本质色，1种透明色，2种特殊效果色
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I;



作为垫底材料联合膏体树脂修复各类洞
(如Tetric N-Ceram/
Tetric N-Ceram Bulk
Fill)



保守裂隙封闭



小洞型充填
(如：III、V类洞)

隔离

红蓝儿童号新上市



OptraGate®

- 让口腔治疗更简单
- 充分展开唇角及脸颊
 - 开阔操作视野
 - 有效快速的隔离效果

专业护理



舒适治疗

- 轻松放置
- 专注治疗过程
- 释放医生双手

修复治疗



更高患者舒适度

- 软质材料更贴合唇轮廓
- 保护牙体组织—特别适合小孩
- 不含乳胶—更好的包容性



NEW

OptraDam® Plus

良好的术野

- 匹配口腔解剖形态，创造3D操作空间
- 各方向充分伸展唇颊肌肉
- 扩展治疗空间

放置简单、操作快速

- 自带面弓，带打孔标记
- 不需配合橡皮障夹
- 易过接触点

患者舒适度提升

- 为软组织提供缓冲区及良好的保护
- 口外遮挡面小

