



准备工作



1.准备好开口器，在对应牙位打孔。




2.-3.左手拿持橡皮障。



4.右手穿过面弓找到内环



5.-6.捏住内环，不要将其完全拉出。挤压内环使内层拱出

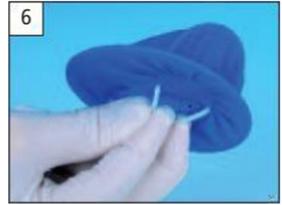

将橡皮障放入口内



7.将橡皮障放置于患者右侧口角（如图）



8.再将另一侧放置于对侧口角



9.将橡皮障下侧内层放入下颌前庭沟（如图）




10.将橡皮障上侧内层放入上颌前庭沟（如图）



11.-12.让患者闭口运动，调整橡皮障，使其处于舒适位



前牙区隔离

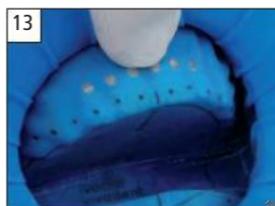

13. -15.将打孔位置对应牙位，使孔一一套入对应牙体（如图，注，根据患者牙弓大小不同，打孔位置可能略有差异）



16. 按从近中向远中的顺序套入
17. 使用牙线过邻间隙。
18. 将龈侧橡皮障翻入银钩。

18. 将龈侧橡皮障翻入银钩。

后牙区隔离



19. 用楔子分离牙体（如图）



20. 楔子放置于牙间隙压住银乳头。



21. 使用牙线过间隙检查牙体分离情况



22. -24. 按牙位一一套入橡皮障孔，并用牙线过间隙使橡皮障套入到位，同样按照从近中到远中的顺序套入牙体。